

PRONTO

产品信息与使用说明

Pronto Sleep

Pronto Sleep是一种独特的精油吸入器，能轻柔地畅通鼻腔并释放宁神复方精油，配方包含四种可以令人自然放松、获得更优质睡眠的传统精油。

如果您有难以入眠或长时间熟睡的问题，Pronto Sleep可能适合您使用。

如果症状持续，请咨询医疗专业人员。

Pronto Clear

Pronto Clear是一种独特的精油吸入器，能轻柔地畅通鼻腔并释放宁神复方精油，配方包含六种可以帮助自然疏通鼻塞的传统精油。

如果您有因鼻塞、过敏、鼻中隔偏曲或气道狭窄而感到呼吸困难的问题，Pronto Clear可能适合您使用。

如果症状持续，请咨询医疗专业人员。

可再充的经鼻精油吸入器

Pronto是一款可再充的经鼻精油吸入器，带有特为设计的存放与再充盒。



使用说明

第一次为Pronto充入精油

第一次打开后，您需要为Pronto充入复方精油，步骤如下：

1. 从包装中取出产品前，请先洗手。
2. 打开Pronto再充装置并取下再充接点罩盖。
3. 如图所示，将Pronto精油吸入器置于再充位置。轻按吸入器，确保其稳固处于再充位置且香氛组件与再充接点相触。静待30秒至两分钟。
4. 取出吸入器并立即用罩盖将再充接点盖上。
5. 遵循下一页的配戴说明，将Pronto吸入器放入鼻内。



为Pronto进行香氛再充

使用后，清洁Pronto并将其置于存放盒的非再充位置。在下次配戴前，请：


1. 打开再充接点罩盖并将Pronto置于再充位置。轻按吸入器，确保其稳固处于再充位置且香氛组件与再充接点相触。
2. 静待30秒至两分钟。
3. 将Pronto放入鼻内并立即用罩盖将再充接点盖上。



Pronto 的设计可使其进行 10 次香氛再充，每次再充的香薰时长可达 8 小时。若不盖上再充接点，任何长短的暴露时间都会导致可再充次数减少。

Pronto的配戴方法

1. 用拇指与食指捏住香氛组件，环形支架朝向自己，环片固定口朝外。
2. 先将环形支架轻推入鼻孔，在推入时向上翘起香氛组件，轻轻推到鼻顶。本款吸入器在设计时依照了鼻孔内壁的自然角度。
3. Pronto应全部进入鼻孔内，只留香氛组件在鼻孔外，横跨两侧鼻孔。如果Pronto不能全部进入鼻孔，那它对您的鼻子来说可能太大了。
4. 调整：如果觉得Pronto太松，或是想要空气更加流通，进行调整也很方便，只需将固定口处的环片轻轻向外拉，让环形增大即可。

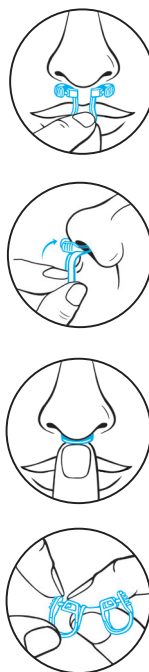

如果在调整时固定销整个松脱，可以轻轻地将其插回，恢复成环形。

Pronto的清洁方法

プロントの使用後には、デイ配戴Pronto后，必须用温肥皂水清洁被放入鼻内的部分，请小心避免香氛组件浸水或沾湿。建议您使用较小容器，温肥皂水装到半满为宜。

1. 用拇指与食指捏住香氛组件，以保护香氛组件。
2. 将Pronto上下倒转，把环形支架浸入肥皂水里，旋转几下。



3. 将容器内的肥皂水倒去，再注入清水，重复步骤1与2进行冲洗。
4. 彻底晾干Pronto，应特别注意环形支架与固定销部分。晾干后，将其放回到存放盒的非再充位置。下次配戴之前，再充接点罩盖应保持盖上。
5. 手指可能沾到精油，所以应清洗双手。



材质与精油

Pronto精油吸入器由医用等级聚合物制成，吸入器与再充装置的材质不是天然橡胶乳胶。

Pronto复方精油含100%纯精油，成分包括：

1. Pronto Sleep含薰衣草、尤加利树、缬草与茶树精油。
2. Pronto Clear含薄荷、薄荷醇、柠檬、尤加利树、茶树与迷迭香精油。

如果您对精油过敏或敏感，请勿使用Pronto；若出现不适反应，请停止使用Pronto。

怀孕期间请勿使用Pronto。

△ 注意

- 请严格遵照说明使用 Pronto。
- 如包装破损，请勿使用。
- Pronto 仅供个人使用，不应与他人共用。
- Pronto 含有精油，因此不应在怀孕期间使用。
- Pronto 不应被用于输送任何其他复方精油、液体或药物。
- Pronto 仅适合被置于鼻中。
- 在手持或佩戴 Pronto 时，请勿吸烟或使用气体打火机。
- 在扩展环片时，动作应保持轻柔，而且对环片的扩展不应超过固定销的长度。
- Pronto 不适合 12 岁以下的儿童使用。
- 如果本装置出现任何损坏，请勿使用。
- 切勿故意折断香氛组件，将本装置一掰为二，单独使用半个扩张器。
- 切勿故意拆卸香氛再充装置。
- 切勿对香氛组件或香氛再充接点添加其他液体或精油。
- 如出现发炎情况，请停止使用并咨询医生。
- 切勿在进行接触性运动、水上运动或游泳时使用。
- 请放置在儿童接触不到的地方，包括所有零散部件。
- Pronto 的设计可使其进行 10 次香氛再充，每次香氛时长可达 8 小时。
- 在 8 小时的香氛总时长内，香氛强度会逐渐减弱。空调和暖气可能会影响 8 小时香氛时长内的香氛强度。
- Pronto 鼻扩张器进行香氛再充需要 30 秒至 2 分钟。最初几次香氛再充用时最少，而在接近 Pronto 使用寿命结束时，香氛再充所需用时可长达两分钟。
- 如果 Pronto 的香氛组件松动，请勿使用。
- 如果 Pronto 的香氛再充接点缺失或松动，请勿使用。
- 如果香氛再充接点出现精油泄漏，请勿使用。
- 请避免将本装置长时间暴露在阳光直射和高温的环境下。
- 当 Pronto 无法再补充香氛，请将香氛充座和鼻扩张器丢入普通垃圾桶。
- Pronto 外包装可回收。

故障排除与常见问题解答

Pronto是如何运作的？

Pronto结合了鼻腔扩张器的各项优点，能够帮助畅通鼻腔，改善空气流通，还能提供有助于睡眠或疏通鼻塞的纯精油香薰。

Pronto可以再充几次？

Pronto可以再充至少10次，每次可配戴最多8小时。

Pronto再充一次需要花多少时间？

根据剩余的再充次数，Pronto需要30秒至两分钟才能完成再充，完全再充后的香氛组件应呈饱和状态。

每次为Pronto再充后，为什么必须用罩盖将再充接点盖上？

用罩盖将再充接点盖上可确保Pronto能再充10次。

为什么我的Pronto不能再充10次？

不正确使用再充装置，尤其是没有用罩盖将再充接点盖上，会导致可再充次数减少。

为什么香氛组件不能沾湿？

香氛组件采用可渗透材质制成，以便充入精油。这种材质被沾湿会影响Pronto再充。

如何确认吸入器的尺寸是否正确？

Pronto应该能全部进入鼻孔内，只留香氛组件在鼻外，横跨两侧鼻孔。如果Pronto留在鼻孔外的部分太多，那它对您的鼻子来说可能太大了。与之相反，如果Pronto从鼻孔松脱，您可能需要调大环形或使用尺寸更大的Pronto。

如果发炎，该怎么办？

如果精油或扩张器引起发炎，请立即停止使用Pronto。

Pronto采用的是什么材质？

Pronto采用超柔软的医用等级聚合物制成，而非天然橡胶乳胶。

如果觉得鼻腔干燥或不适，该怎么办？

除了保持充足的水分外，气流增加可能导致鼻黏膜干燥。可以使用Nozoil等舒缓鼻腔干燥的产品来减轻这些症状。Nozoil有喷剂或凝胶两种，通常含有三种维生素E并混合芝麻油，可帮助在鼻腔组织形成护层，缓解吸入空气造成的干燥并减少发炎。如需更多信息，请查看 <https://tinyurl.com/y2l3f6hh>。

觉得香氛太弱该怎么办？

Pronto经过精心设计，可以提供特定强度的精油以确保最佳效果。我们在使用者试验中测试了香氛强度，由此来确定大多数人偏好的水平。与此同时，我们也十分重视您的意见。请发邮件至feedback@rhinomed.global，告诉我们您对Pronto香氛强度的意见。

觉得香氛太强该怎么办？

Pronto经过精心设计，可以提供特定强度的精油以确保最佳效果。我们在使用者试验中测试了香氛强度，由此来确定大多数人偏好的水平。与此同时，我们也十分重视您的意见。请发邮件至feedback@rhinomed.global，告诉我们您对Pronto香氛强度的意见。

如果香薰无法持续一整晚，该怎么办？

我们精心挑选的专利材料能提供8小时香薰，香薰会在这8小时内逐渐减弱。空调与暖气也会影响在这8小时内的香氛强度。举例而言，相较于正常室温环境，开启中央暖气的环境可能导致香氛组件内的精油蒸发得更快。

怎么确定再充装置的再充次数已经用完？

把一张纸巾轻放到再充接点上。如果纸巾没有被沾湿，即代表再充次数已经用完。如果看到纸巾上沾了一小点精油，则代表再充装置仍可为Pronto补充精油。

Pronto是不是可回收的？

Pronto包装是可回收的，包括外盒与内衬的吸塑托盘。

如果Pronto发生任何严重事故，请立即向Rhinomed Limited报告，联系方式：feedback@rhinomed.global。

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight