

PRONTO

PRODUKT INFORMATION & GEBRAUCHSANLEITUNG

Pronto Sleep

Pronto Sleep ist ein einzigartiger Dampfinhalator, der sanft die Nase freimacht und der eine beruhigende Mischung aus vier rein ätherischen Ölen freisetzt, die traditionell für ihre entspannende Wirkung und ihre auf natürliche Weise den Schlaf fördernde Wirkung bekannt sind.

Wenn Sie beim Ein- und Durchschlafen Schwierigkeiten haben, kann Ihnen Pronto Sleep möglicherweise helfen.

Falls die Symptome nicht abklingen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Gesundheitsberater.

Pronto Clear

Pronto Clear ist ein einzigartiger Dampfinhalator, der sanft die Nase freimacht und eine beruhigende Mischung aus sechs reinen ätherischen Ölen


freisetzt, die traditionell dafür bekannt sind, dass sie eine verstopfte Nase auf natürliche Weise freimachen.

Falls Sie aufgrund einer blockierten Nase, einer Allergie, einer Nasensecheidewandverkrümmung oder zu engen Luftwegen Schwierigkeiten haben, frei zu atmen, kann Ihnen Pronto Clear möglicherweise helfen.

Falls die Symptome nicht abklingen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Gesundheitsberater.

Wiederbefüllbarer Nasendampfinhalator

Pronto ist ein wiederbefüllbarer Nasendampfinhalator. Er wird mit einem speziell entwickelten Aufbewahrungs- und Ladegerät geliefert.

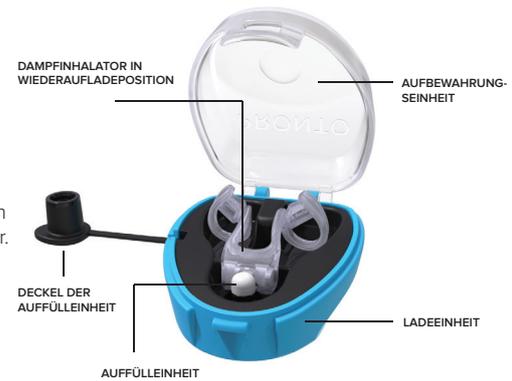

ANLEITUNG

Erstmaliges Befüllen von Pronto

Beim ersten Öffnen gehen Sie bitte bei der Befüllung mit der ätherischen Ölmischung wie folgt vor:

- Bitte waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Produktauspacken.
- Öffnen Sie die Pronto Auffüllereinheit und entfernen Sie die Verschlusskappe.
- Positionieren Sie bitte den Pronto-Dampfinhalator - wie dargestellt - in die Befüllposition. Drücken Sie leicht auf den Befüllbehälter des Geräts, um sicherzustellen, dass dieser sicher in der Ladeposition sitzt, wobei der Duftdiffusor den Ladepunkt berühren sollte. Das Laden dauert von 30 Sekunden bis zu zwei Minuten.
- Entfernen Sie den Dampfinhalator und setzen Sie sofort die Kappe auf die Auffüllereinheit auf.
- Führen Sie den Pronto-Dampfinhalator in die Nase ein. Befolgen Sie dazu die Positionierungs- und Tragehinweise auf der folgenden Seite.



Pronto wiederbefüllen

Bitte reinigen Sie Pronto nach Gebrauch und lagern Sie den Inhalator in nicht gefüllter Position in der Aufbewahrungseinheit. Kurz vor der erneuten Verwendung führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Öffnen Sie bitte die Auffüllereinheit und positionieren Sie Pronto in der Aufladeposition. Drücken Sie leicht auf den Befüllbehälter des Geräts, um sicherzustellen, dass dieser auch wirklich sicher in der Ladeposition sitzt, wobei der Duftdiffusor den Ladepunkt berühren sollte.



- Lassen Sie ihn 30 Sekunden bis 2 Minuten aufladen;
- Führen Sie Pronto in Ihre Nase ein, und setzen Sie nach Gebrauch die Verschlusskappe sofort wieder auf.

Pronto kann bis zu 10 Mal aufgeladen werden und hält bis zu 8 Stunden pro Aufladung. Wenn Sie die Auffüllereinheit einige Zeit nicht abdecken, vermindert dies die Anzahl der Aufladungen.

Anpassen & Tragen von Pronto

- Halten Sie den Duftdiffusor zwischen Zeigefinger und Daumen, wobei die Schlaufen zu Ihnen hin, und die Paddel von Ihnen weg zeigen sollten.
- Führen Sie zuerst die Schlaufen vorsichtig ein und neigen Sie den Diffusor in Richtung Nasenspitze beim Einsetzen. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es sich der natürlichen Nasenanatomie anpasst.
- Pronto sollte so weit in die Nase eingeführt werden, damit nur der Duftdiffusor von außen sichtbar ist, wobei er die Spitze der Nasenlöcher überspannen sollte. Wenn Pronto aus der Nase herausragt, ist möglicherweise der Diffusor zu groß für Ihre Nase.



- EINSTELLEN:** Wenn sich Pronto zu locker anfühlt oder Sie sich einen stärkeren Luftstrom wünschen, dehnen Sie die Schlaufen leicht aus, indem Sie die Flügel vorsichtig nach außen klicken.

Wenn der Stift während der Berichtigung vollständig herauskommt, setzen Sie ihn bitte vorsichtig wieder ein, um die Schlaufe neu herzustellen.

Reinigung von Pronto

Nach dem Tragen von Pronto, sollten Sie das

Nasenteil von Pronto, mit warmem Seifenwasser abwaschen. Achten Sie dabei bitte darauf, den Duftdiffusor nicht ins Wasser zu tauchen oder nicht nass zu machen. Es wird empfohlen, einen kleinen Behälter zu verwenden, und diesen halb mit warmem Seifenwasser zu füllen.

- Schützen Sie den Duftdiffusor, indem Sie ihn mit Ihrem Zeigefinger und Daumen abdecken.

- Stellen Sie Pronto auf den Kopf und tauchen Sie die Schlaufen in die Seifenlösung ein, wobei Sie ihn mehrmals hin und her schwenken.



- Leeren Sie den Behälter und befüllen Sie ihn mit frischem Wasser. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um Pronto zu säubern.



- Lassen Sie Pronto gut trocknen. Bitte achten Sie dabei besonders auf die Schlaufen und Einstellstifte, bevor Sie ihn in der nicht befüllten Position wieder in die Aufbewahrungseinheit einsetzen. Die Auffüllereinheit sollte bis zur nächsten Benutzung von Pronto verschlossen bleiben.
- Bitte waschen Sie Ihre Hände, falls ätherische Öle auf Ihre Finger gelangt sind.

Material & Öle

Der Pronto-Dampfinhalator wurde aus Polymeren, geeignet für die medizinische Anwendung, hergestellt. Der Dampfinhalator sowie die Wiederaufladeeinheit sind nicht aus Naturlatex.

Pronto-Ölmischungen bestehen aus 100 % rein ätherischen Ölen, diese sind:

- Pronto Sleep** enthält Lavendel, Eukalyptus, Baldrian und Teebaum.
- Pronto Clear** enthält Pfefferminz, Menthol, Zitrone, Eukalyptus, Teebaum und Rosmarin.

Bitte verwenden Sie Pronto nicht, falls Sie eine Allergie haben, oder empfindlich gegen ätherische Öle reagieren, oder stellen Sie die Anwendung ein, falls eine unangenehme Reaktion eintritt.

Verwenden Sie Pronto nicht während der Schwangerschaft.

⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie Pronto nur wie angegeben.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Pronto ist nur für den persönlichen Gebrauch vorgesehen und sollte nicht von anderen Personen mitbenutzt werden.
- Da Pronto ätherische Öle enthält, sollte es nicht während der Schwangerschaft angewendet werden.
- Pronto sollte nicht mit anderen Mischölen, Flüssigkeiten oder Medikamenten verwendet werden.
- Pronto ist nur zur Positionierung in der Nase geeignet.
- Rauchen Sie nicht oder verwenden Sie kein Feuerzeug, während Sie Pronto halten oder tragen.
- Seien Sie beim Dehnen der Flügel vorsichtig und dehnen Sie diese nicht über die Stiftlänge hinaus.
- Pronto ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendwelcher Weise schadhaft ist.
- Beschädigen Sie den Diffusor nicht vorsätzlich und verwenden Sie nicht nur eine Hälfte des Dilators.
- Nehmen Sie die Ladeeinheit nicht auseinander.
- Fügen Sie dem Diffusor oder der Auffüllereinheit keine anderen Flüssigkeiten oder Öle hinzu.
- Falls Irritationen auftreten, brechen Sie den Gebrauch sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nicht während der Ausübung von Kontaktsportarten, beim Wassersport oder während des Schwimmens verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, enthält Kleinteile.
- Pronto ist für 10 Ladungen bestimmt, wobei eine Ladung bis zu 8 Stunden anhält.
- Der Duft verliert über die 8 Stunden an Intensität. Auch Klimaanlage und Heizung können die Duftintensität über den Zeitraum von 8 Stunden beeinträchtigen.
- Das Wiederaufladen Ihres Pronto Nasendilators kann von 30 Sekunden bis zu zwei Minuten dauern. Die ersten paar Male geht das Wiederaufladen am schnellsten, während es am Ende des Lebenszyklus von Pronto bis zu zwei Minuten dauern kann.
- Verwenden Sie Pronto nicht, wenn der Diffusor locker sitzt, und auch nicht, falls der Pronto Diffusor sich lockert.
- Verwenden Sie Pronto nicht, wenn die Pronto-Wiederaufladeeinheit fehlt oder locker sitzt.
- Nicht verwenden, wenn die Ladeeinheit Öl verliert.
- Setzen Sie das Gerät nicht länger direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus.
- Wenn Pronto sich nicht mehr aufladen lässt, können Sie die Ladeeinheit und den Nasendilatator im normalen Hausmüll entsorgen.
- Die Pronto-Verpackung ist recycelbar.

Fehlerbehebung & Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert Pronto? Pronto vereint die Vorteile eines Nasendilators, um die Nase zu öffnen und den Luftstrom zu verbessern, mit der Fähigkeit, Dämpfe aus rein ätherischen Ölmischungen abzugeben, die traditionell als dem Schlaf zuträglich hinreichend bekannt sind, oder um eine verstopfte Nase wieder freizumachen.

Wie viele Aufladungen sind mit Pronto möglich? Pronto lässt sich mindestens 10 Mal wiederaufladen. Sie können Pronto nur bis zu 8 Stunden verwenden.

Wie lange braucht Pronto zum Aufladen? Das Aufladen des Pronto dauert zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten, abhängig von der Anzahl der verbleibenden Aufladevorgänge. Der Diffusor sollte, wenn gänzlich befüllt, voll getränkt sein.

Warum muss ich die Kappe der Auffüllereinheit jedes Mal wieder aufsetzen, wenn ich Pronto auflade? Durch das Aufsetzen der Kappe auf die Auffüllereinheit stellen Sie sicher, dass Sie die vollen 10 Ladevorgänge von Pronto erhalten.

Ich bekomme keine 10 Aufladungen mit Pronto? Bei falscher Verwendung der Ladeeinheit, insbesondere wenn die Kappe nicht auf der Auffüllereinheit angebracht wurde, verringert sich die Anzahl der Ladevorgänge.

Warum darf der Diffusor nicht nass werden? Der Diffusor besteht aus einem porösen Material, das entwickelt wurde, um das Öl optimal aufzunehmen. Das Aufladen von Pronto wird durch das Nassmachen des Materials beeinträchtigt.

Woher weiß ich, welche Größe die Richtige ist? Pronto sollte soweit in die Nase eingeführt werden, damit nur der Duftdiffusor von außen sichtbar ist, und er dabei die Spitze der Nasenlöcher überspannen sollte. Wenn Pronto aus der Nase herausragt, ist er möglicherweise zu groß für Ihre Nase. Falls Pronto herausfällt, sollten Sie möglicherweise die Schlaufen anpassen, um sie zu vergrößern oder Sie können es mit einer größeren Größe versuchen.

Was passiert, falls eine unerwünschte Reaktion auftritt? Falls eine unerwünschte Reaktion auf die Öle oder den Dilator auftritt, stellen Sie die Anwendung von Pronto sofort ein.

Woraus besteht Pronto? Pronto besteht aus ultra-weichen Polymeren, zugelassen für die medizinische Anwendung, und wird nicht mit Naturlatex hergestellt.

Was ist, wenn sich meine Nase trocken oder unwohl anfühlt? Abgesehen von einer guten Hydratisierung kann ein erhöhter Luftstrom dazu führen, dass sich die Nasenschleimhaut trocken anfühlt. Produkte, die gegen trockene Nasenschleimhaut eingesetzt werden, wie z.B. Nozöl können dem entgegenwirken. Sie sind als Sprays oder Gel erhältlich und enthalten im Allgemeinen drei Formen von Vitamin E, die mit Sesamöl vermischt sind, um das Nasengewebe vor dem Austrocknen durch die inhalierte

Luft zu schützen und die Auswirkungen von Entzündungen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://tinyurl.com/y2l3f6hh>

Was ist, wenn der Duft zu schwach für mich ist? Pronto wurde entwickelt, um eine bestimmte Konzentration an ätherischen Ölen bereitzustellen, um für Sie das beste Ergebnis zu erzielen. Wir haben die Stärke des Duftes in einem Anwendertest getestet, um die von den meisten Menschen bevorzugte Stärke zu bestimmen. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Bitte schicken Sie Ihr Feedback bezüglich der Stärke von Pronto an feedback@rhinomed.global.

Was ist, wenn der Duft für mich zu stark ist? Pronto wurde entwickelt, um eine bestimmte Konzentration an ätherischen Ölen bereitzustellen, um für Sie das beste Ergebnis zu erzielen. Wir haben die Stärke des Duftes in einem Anwendertest getestet, um die von den meisten Menschen bevorzugte Stärke zu bestimmen. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Bitte schicken Sie Ihr Feedback bezüglich der Stärke von Pronto an feedback@rhinomed.global.

Was ist, wenn der Duft nicht die ganze Nacht anhält? Wir haben eigens Materialien ausgewählt, die eine 8-stündige Duftabgabe gewährleisten. Der Duft wird im Verlauf der 8 Stunden in seiner Intensität nachlassen. Klimaanlage und Heizung können die Duftintensität über einen Zeitraum von 8 Stunden ebenfalls beeinflussen. Bei Verwendung einer Zentralheizung kann der Diffusor beispielsweise schneller verdunsten als bei normaler Raumtemperatur.

Woher weiß ich, ob das Ladegerät leer ist? Nehmen Sie ein Taschentuch und legen Sie es vorsichtig über den Auffüllpunkt. Bleibt das Taschentuch trocken, so ist die Auffüllereinheit leer. Wenn sich ein kleiner Ölfleck bildet, kann das Gerät Pronto immer noch aufladen.

Ist Pronto recycelbar? Pronto Verpackungsmaterial ist recycelbar, einschließlich des äußeren Kartons und der inneren Blisterverpackung.

Sollte eine schwerwiegende Störung mit Pronto auftreten, melden Sie dies bitte umgehend Rhinomed Limited unter feedback@rhinomed.global.

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight