

PRONTO

INFORMATIONS PRODUIT ET MODE D'EMPLOI

Pronto Sleep

Pronto Sleep est un inhalateur à vapeur qui ouvre délicatement vos narines et y vaporise un mélange apaisant de quatre huiles essentielles pures. Nous avons choisi ces huiles pour leur action connue de relaxation, essentielle pour mieux dormir naturellement.

Nous avons élaboré ce produit pour tous ceux qui éprouvent des difficultés à s'endormir et se réveillent trop vite.

Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé.

Pronto Clear

Pronto Clear est un inhalateur à vapeur qui ouvre délicatement vos narines et y vaporise


un mélange apaisant de six huiles essentielles pures. Nous avons choisi ces huiles pour leur faculté à dégager naturellement un nez bouché.

Nous avons élaboré ce produit pour tous ceux qui éprouvent des difficultés à respirer par le nez, suite à une congestion, une allergie, une déviation de la cloison nasale ou des voies respiratoires étroites.

Si les symptômes persistent, consultez un professionnel de la santé.

Inhalateur nasal à vapeur rechargeable

Pronto est un inhalateur nasal à vapeur rechargeable, fourni avec un coffret de rangement et une unité de recharge.

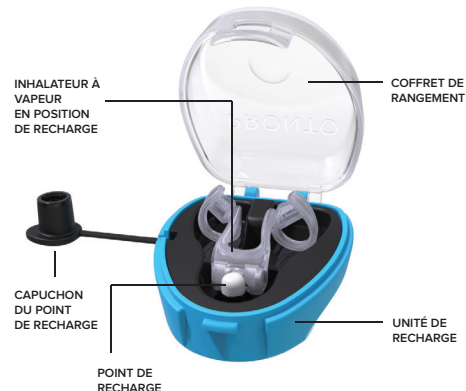

INSTRUCTIONS

Chargement du Pronto pour la première fois

Après avoir déballé votre Pronto, vous devez immédiatement le charger avec le mélange d'huiles essentielles. Pour cela, procédez comme suit :

1. Lavez-vous les mains avant de déballer votre appareil Pronto.
2. Ouvrez l'unité de recharge et retirez le capuchon.
3. Placez l'inhalateur à vapeur Pronto en position de charge, comme illustré ci-contre. Appuyez doucement sur l'appareil pour vous assurer que le diffuseur touche effectivement le point de charge. Attendez la fin de la recharge (entre 30 secondes et deux minutes).
4. Retirez l'inhalateur à vapeur et couvrez immédiatement le point de recharge avec le bouchon.
5. Insérez l'inhalateur à vapeur Pronto dans votre nez, selon les instructions d'ajustement et d'utilisation rapportées à la page suivante.



3. Insérez le Pronto dans votre nez et couvrez immédiatement le point de recharge avec le bouchon.

L'inhalateur Pronto est conçu pour 10 charges, chacune d'une durée maximale de 8 heures.

Ne pas couvrir le point de recharge avec son capuchon peut réduire le nombre de recharges.

Ajustement et utilisation du Pronto

1. Saisissez le diffuseur entre l'index et le pouce, les boucles face à vous et les pattes tournées vers l'extérieur.
2. Introduisez doucement les boucles et poussez le diffuseur vers le haut jusqu'à atteindre le sommet de la cavité nasale. Les branches ont été conçues pour suivre l'inclinaison naturelle de cette cavité.
3. Les branches doivent pénétrer totalement à l'intérieur des narines, jusqu'à ce que seul le diffuseur reste visible sur l'extrémité de la paroi séparant les deux narines. Si une certaine longueur de branche reste visible, votre Pronto est probablement trop grand pour votre nez.
4. **AJUSTEMENT:** Si vous sentez que le Pronto semble lâche dans votre nez ou si vous souhaitez un plus grand débit d'air, écartez les boucles en les tirant doucement sur l'extérieur.



partie qui entre dans les narines avec de l'eau chaude savonneuse. Ne mouillez pas, ni ne lavez le diffuseur. Pour ce nettoyage, prévoyez un petit récipient rempli à moitié d'eau savonneuse tiède.

1. Pour protéger le diffuseur de tout contact avec l'eau chaude savonneuse, recouvrez-le avec votre index et votre pouce.
2. Tenez le Pronto de manière à ce que ses boucles soient dirigées vers le bas et plongez-le, avec ses branches, dans la solution savonneuse. Tournez l'ensemble plusieurs fois dans l'eau.
3. Videz le récipient et remplissez-le d'eau fraîche. Répétez les instructions 1 et 2 jusqu'à rincer complètement votre Pronto.
4. Séchez soigneusement le Pronto, notamment les boucles et les axes d'ajustement, avant de le remettre dans son coffret, en position de rangement. Veillez à ce que le point de recharge soit constamment couvert par son capuchon, jusqu'à la prochaine utilisation de votre Pronto.
5. Lavez-vous les mains pour enlever toute trace d'huile essentielle sur vos doigts.



Matériaux et huiles

L'inhalateur à vapeur Pronto est fabriqué avec des polymères de qualité médicale. Ni l'inhalateur ni l'unité de recharge ne contiennent du latex (caoutchouc naturel).

Pour nos deux produits, nous utilisons les huiles essentielles 100 % pures, suivantes :

1. Lavande, Eucalyptus, Valériane et Arbre à Thé pour **le Pronto Sleep**;
2. Menthe Poivrée, Menthol, Citron, Eucalyptus, Arbre à Thé et Romarin pour **le Pronto Clear**;

En cas d'allergie ou de sensibilité à ces huiles essentielles, n'utilisez pas ou cessez d'utiliser votre Pronto. N'utilisez aucun produit Pronto si vous êtes enceinte.

RRechargement du Pronto

Après chaque utilisation, nettoyez le Pronto et posez-le dans son coffret, en position de rangement. Par la suite, juste avant de le placer dans votre nez :

1. Enlevez le bouchon du point de recharge et placez le Pronto en position de recharge. Appuyez doucement sur l'appareil pour vous assurer que le diffuseur touche effectivement le point de charge.
2. Attendez la fin de la recharge (entre 30 secondes et 2 minutes).



Nettoyage du Pronto

Après chaque utilisation du Pronto, lavez la

⚠ ATTENTION

- Respectez strictement les instructions d'utilisation de cet inhalateur Pronto.
- Ne le mettez pas en marche si l'emballage présente des signes de dommage.
- L'inhalateur Pronto est réservé à un usage personnel: ne le partagez avec personne d'autre.
- L'inhalateur Pronto utilise des huiles essentielles et est donc déconseillé pendant une grossesse.
- N'introduisez aucun autre mélange d'huiles, de liquides ou de médicaments dans votre inhalateur Pronto.
- Cet inhalateur Pronto a été conçu pour une diffusion nasale uniquement.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de briquet à gaz lorsque vous tenez l'inhalateur Pronto ou le portez sur vous.
- Écartez délicatement les branches et jamais au-delà de la longueur de l'axe.
- L'inhalateur Pronto ne convient pas aux enfants âgés de moins de 12 ans.
- N'utilisez pas votre appareil s'il présente le moindre signe de dommage.
- Ne cassez pas intentionnellement le diffuseur et n'utilisez pas une branche seule du dilateur.
- Ne démontez pas intentionnellement l'unité de recharge.
- N'ajoutez aucun autre liquide ni aucune autre huile au diffuseur ou au point de recharge.
- En cas d'irritation, cessez d'utiliser votre appareil et consultez un médecin.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque vous pratiquez un sport de contact, une activité nautique ou la natation.
- Rangez votre inhalateur hors de portée des enfants car il présente de petites pièces.
- L'inhalateur Pronto est conçu pour fournir 10 charges, chacune d'une durée maximale de 8 heures.
- L'odeur diminue progressivement d'intensité pendant cette période de 8 heures. Le fonctionnement simultané d'un climatiseur ou d'un chauffage peut affecter l'intensité pendant les 8 heures.
- Comptez entre 30 secondes et deux minutes pour recharger le dilateur nasal Pronto. Plus le Pronto est neuf et plus les charges sont rapides ; plus il est usé, et plus elles sont lentes.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque le diffuseur Pronto devient lâche.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque le point de recharge a été enlevé ou devient lâche.
- N'utilisez pas votre appareil lorsque de l'huile s'écoule de l'unité de recharge.
- N'exposez pas excessivement votre appareil aux rayons directs du soleil et à la chaleur.
- Lorsque le Pronto ne se recharge plus, jetez l'unité de recharge et le dilateur nasal dans une poubelle normale.

- L'emballage de votre inhalateur Pronto est recyclable.

Informations et foire aux questions

Comment fonctionne le Pronto? Pronto associe les bienfaits d'un dilateur nasal pour ouvrir le nez et améliorer la circulation de l'air, avec un diffuseur pour vaporiser des vapeurs d'huiles essentielles pures, choisies pour leur action bénéfique sur le sommeil et le nez bouché.

Combien de fois puis-je charger mon Pronto? Vous pouvez charger au moins 10 fois votre Pronto, avec chaque charge vous assurant une diffusion de vapeur pendant 8 heures.

Quelle est la durée de recharge du Pronto? La durée de recharge complète est comprise entre 30 secondes et deux minutes, selon le nombre de recharges restantes. Le diffuseur semble saturé lorsqu'il est complètement chargé.

Pourquoi dois-je remettre le capuchon sur le point de recharge après chaque recharge de mon Pronto? Replacer le capuchon sur le point de recharge vous permet d'obtenir effectivement les 10 recharges annoncées de votre Pronto.

Pourquoi mon Pronto ne se recharge-t-il pas 10 fois? Une mauvaise utilisation de l'unité de recharge, en particulier ne pas fermer le point de recharge avec son capuchon, réduit le nombre de recharges possibles.

Pourquoi dois-je éviter tout contact du diffuseur avec de l'eau? Le diffuseur a été fabriqué avec un matériau poreux afin de retenir la charge d'huile. Mouiller ce matériau nuit à la recharge du Pronto.

Comment savoir si la taille de mon Pronto convient à mon nez? Les branches de votre Pronto doivent pénétrer dans la cavité nasale sur toute leur longueur pour ne laisser que le diffuseur visible à l'entrée des narines. Si le diffuseur pend sous vos narines au lieu d'y coller, votre Pronto est probablement trop grand pour votre nez. Si le Pronto tombe de votre nez, essayez d'ajuster les boucles pour l'agrandir ; sinon optez pour une taille plus grande.

Que dois-je faire en cas d'irritation? En cas d'irritation due aux huiles ou au dilateur, cessez immédiatement d'utiliser votre Pronto.

Quel matériau est utilisé pour fabriquer le Pronto? Votre Pronto est fabriqué uniquement avec des polymères de qualité médicale ultra-doux ; il ne contient pas de caoutchouc naturel (latex).

Que faire si mon nez est sec ou si je ressens une gêne? L'augmentation du débit d'air maintient l'hydratation, mais peut provoquer une sensation de sécheresse de la muqueuse nasale. Des produits médicamenteux tels que Nozoil peuvent combattre ces effets. Conditionnés en vaporisateur ou en gel, ils contiennent généralement trois formes de vitamine E mélangées à de l'huile de sésame pour aider à protéger le tissu nasal des effets desséchants de l'air inhalé et réduire les effets d'inflammation. Pour en savoir plus, visitez la

page Web <https://tinyurl.com/y2I3f6hh>

Que puis-je faire si les vapeurs sont trop faibles pour moi? Le Pronto a été conçu dans le souci d'optimiser les résultats pour le plus large éventail possible d'utilisateurs. Nous l'avons donc testé auprès de nombreuses personnes jusqu'à déterminer leur dosage préféré d'huiles essentielles. Pour le parfaire davantage, nous encourageons nos utilisateurs à nous faire part de leur expérience, à l'adresse courriel feedback@rhinomed.global.


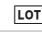






Que puis-je faire si les vapeurs sont trop fortes pour moi? Le Pronto a été conçu dans le souci d'optimiser les résultats pour le plus large éventail possible d'utilisateurs. Nous l'avons donc testé auprès de nombreuses personnes jusqu'à déterminer leur dosage préféré d'huiles essentielles. Pour le parfaire davantage, nous encourageons nos utilisateurs à nous faire part de leur expérience, à l'adresse courriel feedback@rhinomed.global.

Que puis-je faire si la diffusion des vapeurs ne dure pas toute la nuit? Nous avons soigneusement sélectionné les matériaux du Pronto pour vous assurer une diffusion de vapeur pendant 8 heures. Cependant, l'intensité de cette diffusion diminue tout au long des 8 heures. La climatisation et le chauffage peuvent également affecter l'intensité de diffusion. Par exemple, un chauffage central peut accélérer l'évaporation du diffuseur, plus lente avec une température ambiante normale.

Comment puis-je savoir si l'unité de recharge est vide? Prenez un mouchoir en papier et posez-le délicatement sur le point de recharge. Si le mouchoir reste sec, l'unité de recharge est vide. Si une petite tache d'huile se forme sur le mouchoir, vous pouvez recharger votre Pronto.

Mon Pronto est-il recyclable? Tous les matériaux de l'emballage sont recyclables, y compris le carton extérieur et le blister intérieur.

En cas d'incident grave avec votre Pronto, avertissez immédiatement Rhinomed Limited à l'adresse courriel feedback@rhinomed.global.

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight

SERVICE CLIENT

Pour connaître le service client le plus proche de chez vous, visitez notre page Web: prontorange.com/contact-us

PATENT PENDING

Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as trademarks of Rhinomed Limited. Pronto is designed in Australia. Made in China.



Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St. Richmond
VIC 3121 Australia